

Руководство пользователя

Краткая инструкция по работе с сервисом Odonta Index AI для врача и администратора клиники.

1. Вход в систему

Откройте сайт odontaindex.ru и нажмите «Войти». Используйте логин и пароль, выданные администратором клиники. После входа доступны анализы, пациенты, документы, настройки и подписка.

2. Создание пациента

- Перейдите в раздел «Пациенты».
- Нажмите «Добавить пациента» или начните новый анализ.
- Заполните ФИО, телефон, дату рождения и номер карты, если он есть.
- При необходимости укажите дату следующего визита для напоминаний и PDF-отчёта.

3. Анализ гигиены

- Откройте раздел «Анализ».
- Загрузите три фотографии: фронт, правая сторона, левая сторона.
- Отметьте особенности пациента: брекеты, импланты, детский пациент, белые пятна, коронки или виниры.
- Запустите анализ и дождитесь результата.
- Проверьте рекомендации и при необходимости отредактируйте их перед отправкой пациенту.

4. PDF-отчёт

После анализа сервис формирует PDF-отчёт с процентом налёта, индексами, фотографиями, рекомендациями, ёршикограммой, пародонтограммой и сроком следующей профессиональной гигиены. Если врач изменил данные, нажмите «Пересоздать PDF».

5. Пациенты и история

В карточке пациента хранится история анализов, динамика налёта, анкета, ёршики, пародонтограмма, White Spot и дата следующего визита.

6. Уведомления

Telegram и Max боты используются для напоминаний пациентам. Пациент должен написать боту и подтвердить номер телефона, после чего система связывает его с картой пациента.

Версия документа: 2026.07.12